

# Chlorine Disinfection Tabs



## Produktbeskrivelse:

Wet wipe Chlorine Disinfection Tabs er et desinfektionsmiddel i form af vandopløselige brusetabletter med indhold af natrium dichloroisocyanurat (NaDCC).

Når tabletterne opløses i vand afgives klor i dets mest desinfektionsaktive form, som hypoklorsyre (HOCl) også kendt som aktivt klor.

Brugsopløsningen har oxiderende virkning, men er ikke blegende som hypoklorit.

Wet Wipe Chlorine Disinfection anbefales når der er brug for et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel mod virus og bakterier (indvirkningstid 1 min) og desinfektionseffekt mod *Clostridium difficile* bakteriesporer (indvirkningstid 10 min).

## Fordele:

Anvendes Wet Wipe Chlorine Disinfection som foreskrevet har desinfektionsvæsken en minimal korroderende virkning på materialer. Stoffet absorberes ikke i plastik- og elastomerer (materialer af naturlig og syntetisk gummi).

## Fordele

- Stabilitet
- Veldefineret dosis
- Bionedbrydelig
- Minimering af manuelle arbejdsprocesser
- Reduceret spild
- Ingen skumdannelse

## Eksempler på anvendelse:

- Overfladedesinfektion gulve, borde, vaske, baderum, toilet faciliteter ved risiko for smitte med bakteriesporer.
- Henstandsdesinfektion af instrumenter og udstyr der tåler klor

## Wet Wipe A/S

Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk  
Tel: +45 43 62 19 43  
info@wetwipe.dk www.wetwipe.dk

CVR: 30207726

Varenr. 60300

Wet Wipe Chlorine Disinfection tabs leveres i dåser á 200 tabletter á 1,7 gram.

## Dokumentation for effekt:

Wet Wipe Chlorine Disinfection er forhåndsvurderet af CEI.

## Indhold:

1,7 gram Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC, troclosen natrium) i en brusetablet.

Overflader som kan komme i direkte kontakt med patienters hud og overflader som ofte desinficeres f.eks. i kliniske miljøer desinficeres med Wet Wipe Chlorine Disinfection Wipes.

## BRUGSANVISNING

Ved desinfektion af rene overflader og udstyr anvendes 1000 ppm aktivt klor.

For at opnå en opløsning på 1000 ppm, opløs 1 tablet i 1 liter vand.

Ved desinfektion af blodstænk, spildte kropsvæsker, anvendes 4000 ppm aktivt klor.

For at opnå en opløsning på 4000 ppm, opløs 4 tabletter i 1 liter vand.

Ved urin, opkast og afføring rengøres grundigt før desinfektion.

74-062, DA, Ver. 2  
Jan 2016

wetwipe®