


DIOSOL Desinfektion – ny metode til desinficering af rum, overflader og inventar

Nyt produkt

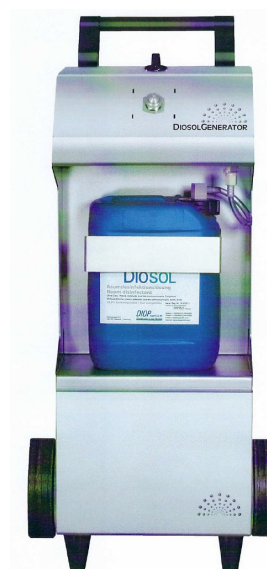

Effektiv ✓ Nem at betjene ✓ Meget mobil ✓ Let at transportere ✓
Uskadelig overfor teknisk udstyr, møbler og tekstiler ✓

DIOSOL desinfektion er en ny metode til desinfektion af rum, overflader og inventar.

DIOSOL apparatet placeres i det rum, der ønskes desinficeret og udsender en "tør tåge", der lægger sig på alle overflader og trænger ind i hjørner og kroge, hvor manuel desinfektion ikke er mulig.

Det aktive desinfektionsmiddel er hydrogen peroxid i en 3% eller 5% opløsning tilsat sølvioner, som er effektivt mod MRSA – Colibakterier – Norovirus og bakteriedannende sporer.

Desinfektionsvæsken leveres klar til brug i 5 l beholdere, som let tilkøbes apparatet.

Kapacitet:

DIOSOL kan desinficere op til 270 m³ i 1 cyklus og beholderkapaciteten rækker til 1600 m³.

DIOSOL apparatet er meget mobilt og let at transportere mellem afdelinger og etager (80x39x30 cm – 30 kg).

Betjening:

DIOSOL apparatet er let at betjene. Efter opmåling af rummet og forsvarlig afdækning af udluftningssystemer og røgalarmer indstilles dysefunktionen til de målte m³ f.eks. 100 m³. Dysefunktionen går i gang efter 30 sek., d.v.s. der er tid til at forlade rummet.

Den totale procestid er 90 min. Herefter kan man gå ind i rummet uden værnemidler.

Indsatsområder:

- Hospitaler
- Ambulancer
- Plejehjem
- Institutioner
- Private hjem